


**F FERNO**  
When It's Critical®

# RMT™

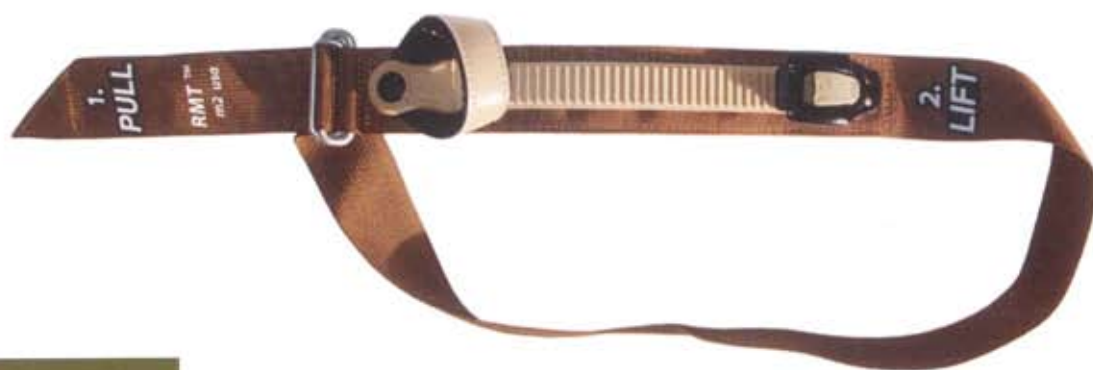

## Ratcheting Medical Tourniquets




### FEATURE

- RMTは、生命を危うくする四肢の出血を制御することができます。
- 唯一のセルフロック式の止血帯です。
- コンパクトで軽量そして堅牢です。
- 片手で簡単に操作できます。
- シンプルで直感的な操作が可能です。
- ラチェットの1ノッチごとに締まっていくので、適した強さで締めることが容易で、締め過ぎを防止することができます。



### SPECIFICATIONS

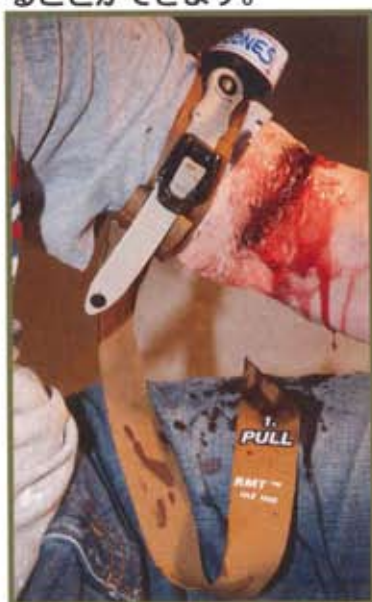


# 1 PULL

## OPERATION



圧迫止血をしたい四肢にRMTを巻きます。ループを手、または歯で抑えながら、ウエビングを引いてRMTを締めます。

# 2 LIFT

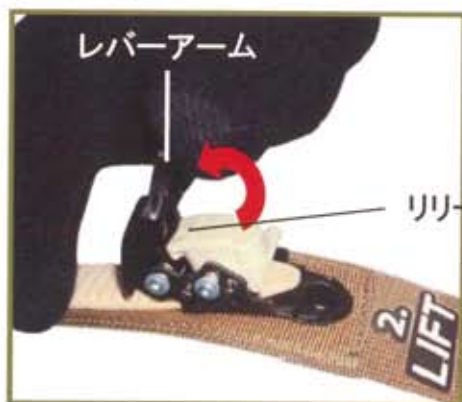

ウエビングを引いて締めた後に、ラチェット部のレバーアームを起こして増し締めを行います。これを繰り返して締まる強さを増していくことができます。

### ◇リリース(解除):

ラチェット部のページ色の「LIFT」と印字されているリリースレバーを引くとロックが解除され、ラチェットがスライドして緩めることができます。



仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元

**FERNO**  
Japan

ファーノ・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 F Kビル 4F

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

URL <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店