

米国ベアトリス・プラントマン社製

Beasy Trans

and The

Beasy II

ビージートランス ビージーII

(特許申請中)



移し替えシステム

移し替えが必要なさまざま

ピージートランスはディスク（円盤）の非常にスムーズな動きにより、移し替えを容易に行うための器具です。下記のように2本使うことにより、患者が寝たままの状態ですぐに移動が行えます。

使用例

ベッド ⇄ ストレッチャー



① ストレッチャーのブレーキを確実にロックします。患者を側臥位にし、本器を肩と腰の下にそれぞれ差し込みます。



② 患者をもとに戻し、患者の首と足首を抱えるように持ちます。
患者の手が移動に差し障りがあるようでしたら手をお腹の上で組ませます。



③ 前後2名の介護者はタイミングを合わせて患者の肩と腰を押してスライドさせます。



④ 移動終了後、患者を再び側臥位にし、本器を引き出します。



斜め移動も可能です

ベッド回りには、色々な器具があり患者を斜めに移動させた方がスムーズに移動できる場合が多いようです。
従来の移し替え器具のほとんどが真横への移動が主であるのに対し、ピージートランスは斜めの移動も行えます。

な状況でご利用になれます

その他、多くの移し替え時に幅広く使用できます。



●手術台⇄ストレッチャー



●分娩台⇄ストレッチャー



●ストレッチャー⇄ストレッチャー



●撮影台⇄ストレッチャー

- 一般病棟 ■救急外来 ■産婦人科 ■外科 ■脳神経外科 ■各種検査室(検査室など) ■リハビリ
- オペ室など移し替えが必要な様々な部門でご利用になれます。

注) 移す側、移される側の台が平らであることが条件です

車内での座席移動

～このような使い方も可能です～

注) 本例はベンチシートの場合のみ有効です。



① 車内の座席に本器をおきます。または患者の下に本器を差し込みます。



② 患者をディスクの上に乗せ引き込むようにスライドさせます。



③ 患者によっては、車の取っ手を利用して自力での移動も可能です。

特長

- ディスクのスムーズな動きにより、移し替えを容易に行う事が出来ます。
- 人を持ち上げる必要がないので介護者の労務を軽減する事が出来ます。
- 軽量、コンパクトなので持ち運びが容易です。
- リフト等のように設置工事を必要としません。
- 応用範囲が広いので数種類の器具を使い分けなくて済み、大変経済的です。

注) ・本体の両端の段差が5cm以上にならないようにして下さい。

・衣類をつけていないか薄い衣類を着用して使用する場合は、ディスク部にタオル等を敷いて下さい。

・橋渡しは、ディスクがスライドするミゾの両端の部分が確実に移す側、移される側に乗っているかを確認して下さい。

・使用前は必ず取扱説明書をお読み下さい。

ピージートランスはサイズが2種類ありますので、利用の状況・用途に合わせてお選び下さい。



ピージートランス モデル479 (100cmタイプ)

ピージーII モデル469 (70cmタイプ)

仕様							材質
	長さ	幅	厚さ	重量	最大荷重		
ピージートランス モデル 479	100cm	30cm	3.6cm	2.9kg	170kg	ポリマー樹脂	
ピージーII モデル 469	70cm	30cm	3.6cm	2.0kg	170kg	ポリマー樹脂	

輸入元



FERNO
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F

TEL 03(5820)4649(代) FAX 03(5820)4669

商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1

TEL 0426(77)6656(代) FAX 0426(77)6603

米国本社: オハイオ州ウィルミントン ウェイルウェイ70

販売店: