



ヘリタック ホットシート Helitack HotSeat



CMC レスキュー社製

クロッチストラップ

- ◇ ヘリタック ホットシートは、ヘリコプターによるショートハウルや、ホイストで吊り上げて要救助者の救出を行うための設計が行われています。
- ◇ 素早い装着ができて、ハーネスの装備を必要とせず、半座位の安定した状態を保つことができます。
- ◇ 小児から体重227kgの大人まで使用することができます。
- ◇ NFPA1983(2012)救出機材クラスⅢに認定されています。
- ◇ 転落を防止するクロッチストラップの長さは調整することができます。

使用方法

1. ベストを着る要領で両腕をアームホールに通します。
2. 両サイドのD環とクロッチストラップ先端のループをカラビナでまとめます。
3. クロッチストラップの長さを調整します。
4. カラビナをホイストのフックに取り付けます。

仕様

NFPA : クラスⅢ エクストリケーション デバイス
重量 : 2.2kg
収納寸法: 直径20cm×高さ41cm
材質 : コーデュラナイロン(1000デニール)
コード : 724468



収納バッグ:
ロープバッグ#1を転用した
コーデュラナイロン製です。
ホットシート内に設けられた
バックルと接続することができます。

セカンダリー レストレイント システム

身長が150cm以下の要救助者は、クローチストラップだけでは転落を止めることができない可能性があります。開閉式パッドの下に縫製されているストラップを使用して固定することができます。



ホットシート内側



ホットシート底部



開閉式パッド



コブラバックル ストラップ



夜間での活動において、視認性向上のため底部に光反射テープが縫い付けられています。



輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社

総発売元：
株式会社ジェイ・プランニング
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-12
TEL：0422-20-4488
FAX：0422-20-8440
URL：<http://www.jpla.co.jp>

販売店：