

# スクープハーネス



ITEM CODE : 05204805

- スクープハーネスは、スクープストレッチャーやバックボード等の持ち手があるすべての担架（搬送具）に使用することが出来ます。
- 傷病者と担架の荷重を手だけでなく身体全体で支えることが出来るので、長距離搬送での安定性が増し疲労を軽減することが出来ます。
- 両手をフリーにすることができ、バランスが取りやすいので安全性が向上し、ドアを開けたりすることも容易です。
- 装着した後で、ハーネスの長さを無段階で簡単に調整することが出来ます。
- スナップバックルとVリングの脱着は素早く確実に行うことが出来ます。



CMCレスキュー社製

## 使用例

### ハイテクバックボード



二人とも進行方向を向いて搬送することが出来ます。

### タイタン



救助者が向かい合って搬送することも出来ます。

### スクープエクセル



荷重はスクープハーネスで受けるので手は添えるだけです。

この他にも、バスケットストレッチャーや、コンビネーションストレッチャー、フォールディングストレッチャー、パーティカルストレッチャー、レスキューシート等の搬送にも使用することが出来ます。



チェスト  
ストラップ

ディバイダー

スナップバックル

Vリング

アジャスター  
バックル

ウェビング

- ・体格の違いに合わせて、ウェビングが通っているディバイダー部とアジャスターを調節してわきの下の広さを変更することができます。(フリーサイズです)。
- ・チェストストラップは、左右のウェビングが広がるのを防ぎ、長さの調節が可能です。

### 仕様

ウェビング	材質	ナイロン
	巾	44mm
重量		1kg
最大荷重		150kg

※スクープハーネスは一着で一人分です。  
前後二人で搬送する際は二着必要となります。  
※仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。



Vリングを持ち手の下側から通します。



スナップバックルにVリングを取り付けます。



取り付け後にウェビングを引いて長さの調節をします。



輸入元

 **FERNO**  
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

東京都千代田区岩本町1-9-5  
FKビル4階  
TEL: 03-5820-4649  
FAX: 03-5820-4669

販売店