

類別：器具器械58 整形用器具器械
一般的名称：非電動型簡易型牽引装置
JMNDコード：35519001
クラス分類：クラスI 一般医療機器（特定保守管理医療機器）

ファートラック


【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は改造、又は分解しないで下さい。

【形状、構造等】**

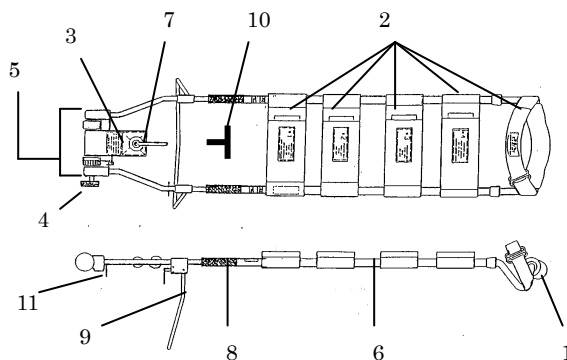

- 1 大腿部パッド 傷病者の大腿部を乗せるパッドです。
- 2 ストラップ 傷病者の足を固定する際に使用します。
- 3 ラチェットストラップ アンクルヒッチに固定する「S」字型の金具が付いたストラップです。
- 4 ラチェットノブ 固定力を調節するためのノブです。
- 5 ラチェットアッセンブリー ラチェットノブが逆回りするのを防止するためのノブです。
- 6 フレーム 本体のフレームです。
- 7 「S」字型フック ラチェットストラップとアンクルヒッチを固定する金具です。
- 8 長さ調節スリーブ 傷病者の足に合わせて、本体の長さを調節します。
- 9 ヒールスタンド 傷病者の足が地面に着かないようにするスタンドです。
- 10 アンクルヒッチ 足首に巻くストラップです。
- 11 リリースピン 固定を解除するためのピンです。

本体フレームに大腿部を乗せてストラップで固定し、足先に通したアンクルヒッチを引く事で牽引しながら固定します。

【使用目又は効果】**

- 1 使用目的 骨折、負傷した足を固定するための固定装置です。
- 2 効能又は効果 骨折、負傷した足の二次障害を防止します。

【性能及び安全性に関する規格】**

- 1 傷病者の体格に合わせて、小児用、大人用の2種類から選択出来ます。(小児用:モデル443 大人用:モデル444)
- 2 フレームの長さを調整出来ますので、傷病者に合わせて適切な固定状況を得る事が出来ます。

【使用方法】**

- 1 本体を傷病者の足の下にセットし、ヒールスタンドを立てます。
- 2 大腿部をパッドの上に合わせ、本体の長さを調節します。
- 3 各部のストラップを傷病者の足に巻き固定します。
- 4 アンクルヒッチを足首に巻き、ラチェットストラップの「S」字フックをアンクルヒッチの金具に引っ掛けます。
- 5 本体の長さが適切でない場合は、再度調節します。
- 6 ラチェットノブを回し、ラチェットストラップを伸ばして傷病者の足を固定します。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人以外は使用しない事。
- 2 操作は2人以上で行う事。
- 3 十分に訓練を行う事。
- 4 使用中は傷病者の状態を絶えず確認する事。
- 5 本体に異常の無い事を絶えず確認する事。
- 6 傷病者または本体に異常が発見された場合には、傷病者に安全な状態で適切な措置を講ずる事。
- 7 使用後は本体を洗浄し、使用前の状態で収納する事。
- 8 本体に悪影響の生じる恐れのない場所に保管する事。
- 9 本体は改造しない事。また分解しない事。
- 10 しばらく使用しなかった時は、使用前に点検する事。

【保管方法及び有効期間】**

- 1 常温で保管する事。
- 2 化学薬品の保管場所やガスを発生する場所等に保管しない事。

【保守・点検に関する事項】*

- 1 ラチェットストラップに亀裂が入ったり伸びきったままになったりした時は交換して下さい。
- 2 汚れた時は、中性洗剤を含ませた布で拭いて下さい。

【包装】 1個単位

【輸入販売業者の氏名又は名称及び住所】*

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel:03-5820-4649
- 2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ オハイオ州