

類別 : 機械器具等 理学診療用器具
一般的名称 : 再使用可能な止血帯
JMDNコード : 17230000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

RMT (アール エム ティー)

【警告】

- 1 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人以外は使用しないで下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本器は改造又は分解しないで下さい。
- 2 本器に異常が生じた時は、使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】



- | | |
|----------|-----------|
| 1 ダブルリング | 4 リリースレバー |
| 2 ループ | 5 レバーアーム |
| 3 ラチェット部 | 6 ウェビング |

本体はウェビングにラチェットが取り付けられたものであり、仮固定された位置よりラチェットレバーを締め込むことで緊縛強度を増加させて、血流を遮断させることのできる止血帯です。ダブルリング構造により、仮止め位置より緩むことはありません。

【使用目的又は効果】

- 1 使用目的 上下肢の出血に対して緊縛止血を行うこと。
- 2 効果 血流を緊縛遮断することで更なる出血を止めることができます。

【使用方法等】

- 1 本器を止血したい上下肢に巻き、ループを指又は歯で抑えながらウェビングを引き絞ります。
- 2 レバーアームを起こして締め込みを行う前に、必ず上下肢と本器の間に指が3本以上入らないことを確認します。「3フィンガーチェック」を行います。
- 3 黒色のレバーアームを上へ持ち上げて1ノッチずつ緊縛の強さを調節し、出血が止まる位置まで締め込みます。
- 4 取り外す場合、レバーアームの中にあるリリースレバーを持ち上げてラチェットを解除します。
- 5 必要に応じて、ウェビングの止血開始時間を記載して管理します。

取扱説明書を必ず参照下さい

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
- 2 使用中は傷病者の状態を絶えず観察すると同時に、本器に異常が無いことを確認します。
- 3 傷病者又は本器に異常が生じた時は、傷病者の安全を確保しながら本器を外し、適切な処置を講じて下さい。
- 4 本器の改造又は分解は禁止します。
- 5 本器は単回使用品です。

【保管方法及び有効期限】

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 極端な高温の場所で長期間放置した場合は、プラスチック部分に変形が起こる可能性があります。
- 3 本器に特別な有効期限は設定されていません。
- 4 本器は単回使用品となります。

【取扱上の注意】

- 1 破損等が生じた場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【包装】

1本単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649
- 2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州