

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 成型型副木
JMDNコード : 36204000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

サムスプリント

【警告】

- 1 実際使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体は繰り返し使用できますが、内部のアルミニウム板が露出した時は、危険ですので使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】



- 1 外側：軟質ウレタンフォーム 2 内部：アルミニウム板

【使用目的又は効果】**

- 1 使用目的 負傷部位を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 負傷部位を固定する事で、二次障害を防止します。

【性能又は安全性に関する規格】**

- 1 必要に応じてハサミでカットし、手、指用副木としても使用可能です。
- 2 装着したまま、レントゲン撮影が可能です。

【使用方法等】**

- 1 本体を負傷部位に巻き付け、適切な形に整えます。
- 2 手、指用副木として使用する場合は、本体をハサミでカットして形を整えます。
- 3 上からタオル、ハンカチ等で固定します。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。

【保管方法及び有効期間】**

- 1 開封前は常温で保管して下さい。
- 2 開封前は化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 使用期限はありませんが、内部のアルミニウムが露出した場合は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 繰り返しの使用で、内部のアルミニウムが露出した場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1 使用後はアルコール等で表面を拭いて下さい。
- 2 使用の都度、内部のアルミニウムが露出していない事を確認して下さい。

【包装】

1 ロール単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】*

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649

- 2 製造業者 Ferno Washington Inc.
ファーノ ワシントン社
アメリカ合衆国 オハイオ州

取扱説明書を必ず参照下さい。