

類別 : 医療用品5 副木
一般的名称 : 真空成形型式副木
JMDNコード : 35358000
クラス分類 : クラスI 一般医療機器

バキュームスプリント AS190-J


【警告】

- 1 実際使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
- 2 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 3 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

- 1 本体に亀裂が入った時、バルブが破損した時は使用を中止して下さい。
- 2 内部の空気を抜く時は、付属のポンプ以外は使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

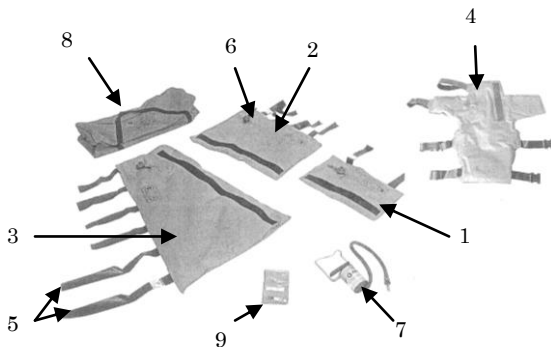

- 1 AS100 腕用(短) 2 AS120 腕用(長) 3 AS140 足用
- 4 AS130J 頸椎用 5 固定用マジックテープ 6 吸引用バルブ
- 7 バキュームポンプ 8 収納ケース 9 リペアキット

【使用目的又は効果】*

- 1 使用目的 受傷部位を固定するために使用します。
- 2 効能又は効果 受傷部位を固定する事で、二次障害を防止します。

【性能及び安全性に関する規格】*

- 1 水分や血液等が浸透しません。

【使用方法等】*

- 1 本体を受傷部位に巻き付け、マジックテープで固定します。
- 2 バルブのノブをオレンジの点まで回し(半時計回り)、ポンプのホースをバルブに接続します。
- 3 ポンプを引き、内部の空気を吸引します。
- 4 必要に応じて、本体の形を整えながら吸引して下さい。
- 5 本体が硬くなったらバルブのノブを黒い点まで回し(時計回り)バルブを閉めます。終了したらポンプを抜いて下さい。
- 6 外すときはバルブを開け、自然に膨らませて下さい。

【使用上の注意】

- 1 使用方法を習得した人意外は使用しないで下さい。
- 2 装着は2人以上で行って下さい。
- 3 本体を装着する時は、受傷者の状態を絶えず確認して下さい。
- 4 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
- 5 受傷者又は本体に異常が発見された時は、受傷者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
- 6 本体は改造又は分解しないで下さい。

【保管方法及び有効期間】*

- 1 常温で保管して下さい。
- 2 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
- 3 使用期限はありませんが、本体に亀裂が入った時やバルブが破損した時は使用を中止して下さい。

【取扱上の注意】

- 1 繰り返しの使用で本体に亀裂が入る等の劣化が見られる時は使用を中止し、販売代理店又は弊社に修理を依頼して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1 使用後はぬるま湯等で表面を拭いて下さい。
- 2 使用の都度、本体に亀裂が無いか、バルブが破損していないか確認して下さい。

【包装】

1セット(全種類)単位又は交換用単品単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 1 製造販売業者 ファーノ・ジャパン・インク
東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
Tel: 03-5820-4649

- 2 製造業者 AB GERMA
エーピー ガーマ社
ドイツ

取扱説明書を必ず参照下さい。